

MERZ AESTHETICS



**V – efektas**

Informacija pacientui  
apie dvejopą poveikį  
koreguojant veido  
apimtį

**RADIESSE**<sup>™</sup>  
Volumising filler

## V-efekto dėka atrodyk natūraliai jauna bet kuriame amžiuje

### Senėjimo požymiai

Ar galite prisiminti, kaip atrodėte, kai Jums buvo 16? Maždaug taip, kaip dabar, tik... jauniau. Tas pats veidas, tik jis kažkaip prarado savo formą.

### Ar jaučiatės jauna ir aktyvi, bet atrodote senesnė?

Dauguma moterų žino brandaus amžiaus problemą: mes labai stengiamės prižiūrėti savo odą, bet įmantrių kremų, reguliarių pratimų, sveikos mitybos ir litrų vandens nebeužtenka. Makiažas, laikui bėgant, taip pat jau nebegali paslėpti senėjimo požymių.

Łąstelių dalijimosi procesas, kuriam vykstant oda nuolat atsinaujina, sulėtėja nuo 25 – 29 metų amžiaus. Oda praranda drėgmę ir elastingumą. Pirmosios smulkios raukšlės pasirodo aplink akis ir burną. Veidas tiesiog nėra toks stangrus ir lygus, kaip anksčiau.

Moksliniais tyrimais nustatyta ir kliniškai patvirtinta, kad Radiesse™ odos užpildas turi dvejopą poveikį. Užpildas akimirksniu išlygina raukšles, stimuliuoja kolageno gamybą ir taip padeda odai atsinaujinti. Mes tai vadiname V-efektu.

**Perskaitykite ir sužinokite visą informaciją apie V-efektą.**

*„Jūs negalite atsukti laiko atgal.  
Tačiau Jūs galite jį sulėtinti.“*




## Jaunas veidas turi „V”- formą

Kuo jaunesnis veidas, tuo tvirtesnė oda ir aiškesni kontūrai. Veidas yra simetriškas ir turi „V” formą.

Jaunatviška išvaizda:  
optimalus apimties pasiskirstymas

Senėjimo požymiai:  
vyksta apimties „persiskirstymas”

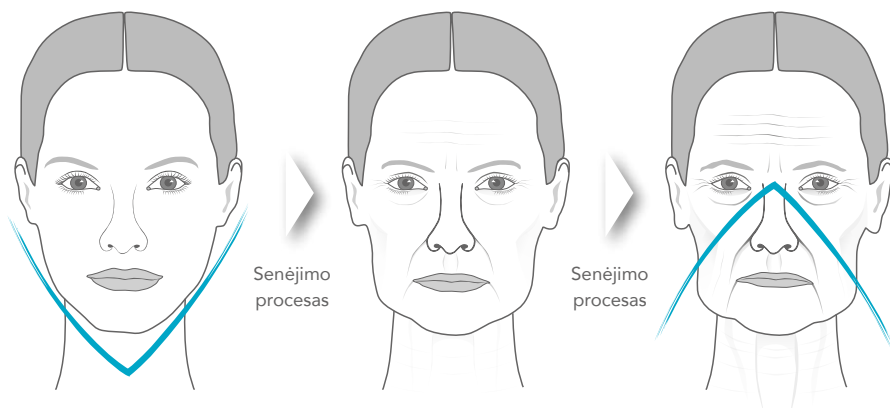

## Su amžiumi „V” „apsiverčia”

Kokie geri Jūsų genai bebūtų, visų tipų oda galiausiai praranda savo tonusą. Pasikeičia veido proporcijos ir sumažėja atskirų veido dalių apimtis. Skruostai nusileidžia, smakras pasidaro nestandus ir veidas apačioje išplatėja. Rezultatas: jaunatviška „V” pamažu „apsiverčia” ir Jūsų amžius tampa žymiai labiau pastebimas – nors jaučiatės labai jaunatviškai.

## Radiesse™ – apimčiai ir kontūrams

Norint atstatyti jaunatvišką ir skaisčią išvaizdą, dažnai nepakanka atskirų raukšlių gydymo. Siekiant atsverti sunkio jėgos poveikį ir atgauti jaunatvišką formą, reikia atkurti tikrą veido apimtį. Tai galima pasiekti naudojant odos užpildą, kuris stimuliuoja natūralią kolageno gamybą, suteikdamas efektingą ir ilgalaikę veido ar kitos kūno dalies apimtį.

Radiesse™ sugrąžina apimtį tiksliai ten, kur ji buvo. Švelniai formuojant, gilesnės raukšlės, įdubimai ar nukarimai, pakritę skruostai dingsta, ir naturalūs veido kontūrai sugrįžta.



### Dvejetainis poveikis apimties formavimui


- Greitas poveikis dėl gelio-matricos
- Ilgai trunkantis poveikis dėl kolageno gamybos stimuliacijos

### Saugus naudoti


- Išsamiais klinikiniais tyrimais patvirtintas veiksmingumas ir tolerancija
- Klauskite gydytojo, ką Radiesse™ gali padaryti Jūsų labai

## Apimties suformavimas, suteikiant V-efektą


Dėl gelio-matricos, Radiesse™ sukuria greitai matomą efektą. Radiesse™ smulkios kalčio mikrosferos stimuliuoja natūralų kolageno formavimąsi odoje, suteikdamos ilgai trunkantį apimties padidėjimą. Pats gelis, taip kaip ir mikrosferos, per tam tikrą laiką organizme visiškai suyra.

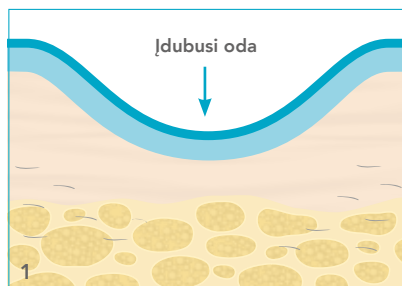

**1**  
**Prieš gydymą:** Apimties ir kontūrų praradimas dėl senėjimo

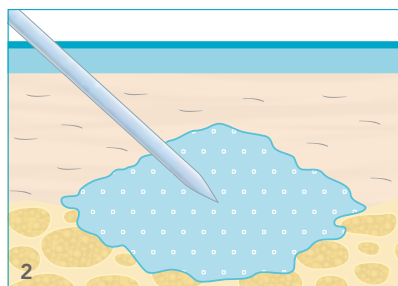



**2**  
**Po gydymo:** Gelio-matrica akimirksniu suteikia prarastą apimtį

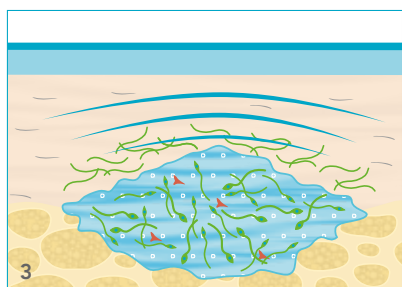


**3**  
**Ilgainiui:** mikrosferos stimuliuoja paties organizmo kolageno gamybą odoje




**4**  
Ilgalaikė apimtis didėja dėl naujai suformuotų kolageno skaidulų (V-efektas)

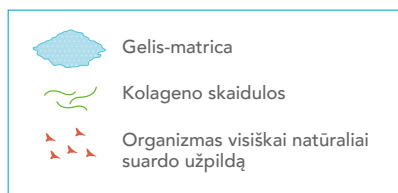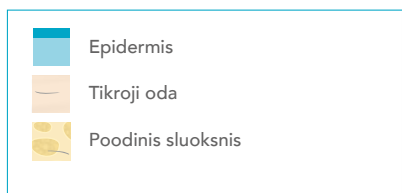

A woman with dark hair pulled back, wearing a white tank top, is smiling warmly at the camera. Her hands are clasped together in front of her face, resting on her chin. The background is plain white.

„V- efektas atrodo taip gerai.  
Ir tai taip paprasta.“

Apimties užpildas gilių raukšlių korekcijai, veido kontūrų formavimui ir išryškinimui

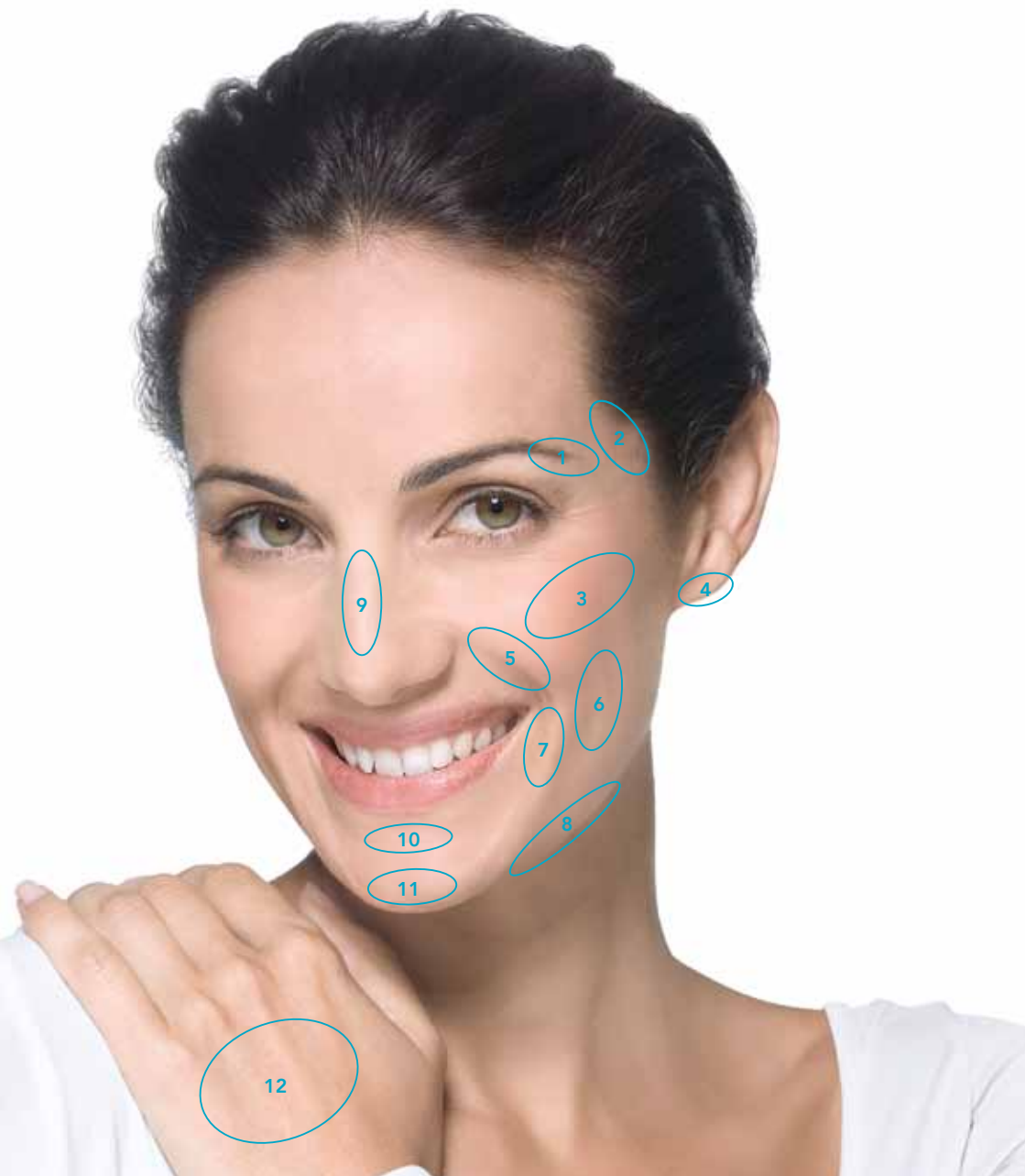

## Radiesse™ – veiksmingas daugelyje vietų

### 1 Antakiai

Radiesse™ gali pakelti Jūsų antakius ir atverti akis.

### 2 Smilkiniai

Įdubę smilkiniai gali būti užpildyti. Suteiks Jūsų veidui sveikesnę, mažiau pavargusią išvaizdą.

### 3 Skruostikauliai

Padidinta skruostikaulių apimtis paryškina veido „V“- formą ir užtikrina jaunatvišką išvaizdą.

### 4 Ausies speneliai

Jūsų auskarai, įverti į pilnus ir lygius ausų spenelius, atrods daug gražiau.

### 5 Nosies-lūpų raukšlės

Raukšlės, jungiančios nosį ir lūpų kampučius, erzina. Jos gali būti lengvai užpildomos, – ir Jūs iškart atrodysite skaisčiau ir jauniau.

### 6 Skruostai/Įdubę skruostai

Įdubę skruostai gali būti efektyviai užpildomi Radiesse™.

### 7 Marionetės raukšlės

Liūdna ar susirūpinusi veido išraiška dingsta, kuomet šios linijos yra užpildomos.

### 8 Nusileidęs žandikaulio kontūras

Aiškūs apatinio žandikaulio kontūrai padeda palaikyti jaunatvišką „V“ veido formą.

### 9 Nosies nugarėlė

Maži iškilimai ir įdubimai ant nosies nugarėlės gali būti užpildyti Radiesse™ ir išlyginti.

### 10 Smakro raukšlė (klostės)

Nusileidusi smakro raukšlė – paprastai vyrams – gali būti užpildoma Radiesse™ ir smakras atrodys tvirtesnis.

### 11 Smakras

Plokščias smakras gali padaryti Jūsų veidą mažiau išraiškingą. Maži iškilimai ant smakro gali suteikti veidui netolygią išvaizdą. Naudokite Radiesse™ ir atrodysite natūraliai ir išraiškingai.

### 12 Išorinė plaštakos pusė

Bėgant laikui, plaštakos kraujagyslės ir kaulai darosi vis aiškiau matomi. Kai Jūsų rankų oda praranda apimtį, gali padėti Radiesse™.

**Radiesse™ Jums gali daug padėti!**

## Radiesse™ – atstato veido ir rankų apimtį

### Užpildas skruostikauliams, skruostams ir gilioms raukšlėms

Dėl amžiaus odoje atsirandanti drėgmės stoka ir ląstelių dalijimosi lėtėjimas lemia tai, kad oda praranda elastingumą, tonusą ir tamprumą. To proceso padariniai – gilesnės raukšlės, ypač aplink nosį ir burną, kartais – ant smakro. Tuo pačiu metu po oda esantys plonieji riebaliniai audiniai, kurie yra reikalingi stangriai ir lygiai odai palaikyti, lėtai yra. Šis apimties netekimas ypatingai išryškėja ant skruostikaulių ir skruostų. Naudojant Radiesse™ šios vietos gali būti švelniai pakoreguotos. Rezultatas – sugrąžintas natūraliai matomas veido gyvybingumas ir grožis.



Negydytas skruostikaulis/skruostas



Gydytas skruostikaulis/skruostas

### Pasiek daugiau su Radiesse™

Kai mūsų oda pasidaro mažiau stangri, nusileidžia žandikaulio kontūras. Vėlgi, priežastis yra po oda esančio plonojo riebalinio audinio netekimas. Apimties atstatymas atnaujina žandikaulio kontūrus ir grąžina veidui jo ankstesnę jaunatvišką formą. Atkreipkime dėmesį, į nosį, kuri yra veido centras ir esminis bruožas. Kai kurie iš mūsų, turi nosį, kuri kažkaip nesiderina su veidu. Radiesse™ gali padėti performuoti ir sušvelninti nosies trūkumus. Mūsų rankos taip pat gali išduoti amžių. Venos ir kaulai tampa žymiai labiau matomi išorinėje plaštakos pusėje. Apimties netekimas gali būti atstatytas naudojant Radiesse™.

## Radiesse™ – įtikinantys rezultatai



Negydyti įdubę skruostai



Gydyti įdubę skruostai



Negydyti skruostai



Gydyti skruostai



Negydyta sritis



Gydyta sritis

## Gydymo rezultatas – akivaizdus




Negydytas apatinio žandikaulio kontūras



Gydytas apatinio žandikaulio kontūras



Negydyta nosis

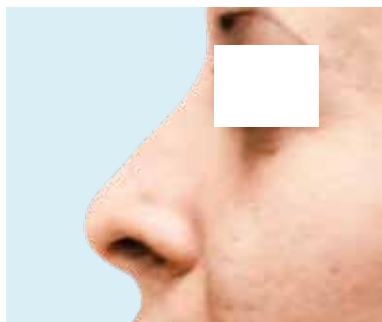

Gydyta nosis



Negydyta išorinė plaštakos dalis



Gydyta išorinė plaštakos dalis

## Klausimai ir atsakymai

### **Ar Radiesse™ buvo tinkamai ištirtas ir sertifikuotas?**

Taip, Radiesse™ buvo patvirtintas ES atsakingų institucijų 2004 metais. Šis preparatas turi CE sertifikatą, kuris yra Europos Sąjungos produkto saugos įvertinimas ir įrodo, kad produktas buvo patikrintas nepriklausomų institucijų. Radiesse™ taip pat buvo patvirtintas FDA (Amerikos maisto ir vaistų administracijos) 2006-aisiais metais.

### **Kokia yra gydymo procedūra?**

Jūsų gydytojas Jums paaiškins galimus gydymo variantus ir aptars su Jumis, kuris Jums labiausiai tiktų. Gali prireikti tik vieno apsilankymo pas gydytoją, kad būtų pasiektas optimalus gydymo naudojant Radiesse™ rezultatas ir tai truks tik apie 30 minučių. Rezultatą matysite iškart po injekcijos.

### **Ar gydymas skausmingas?**

Daugumai pacientų gydymas palyginti neskausmingas, tačiau žmonės skausmą suvokia skirtingai. Pasitarkite su gydytoju dėl galimų anestetikų pasirinkimo.

### **Jei vartojate vaistus...**

Jeigu vartojate vaistus, įskaitant ir įsigytus be recepto, prieš gydymą informuokite savo gydytoją. Kraujo krešėjimą mažinančių ir nuskausminamųjų vaistų, įskaitant ir aspiriną, vartojimas gali sukelti nepageidaujamas kraujosrūvas. Gydytojas suteiks Jums reikalingą konsultaciją.

### **Ar gali pasireikšti šalutinių poveikių?**

Jums gali pasireikšti reakcija į injekciją. Tai gali būti nežymus patinimas, skausmas, niežėjimas, kraujosrūvos ar odos spalvos pokyčiai ir padidėjęs jautrumas. Šie reiškiniai paprastai išnyksta po keleto dienų.

### **Kaip ilgai trunka Radiesse™ poveikis?**

Individualūs rezultatai priklauso nuo amžiaus, odos tipo, gyvenimo būdo ir medžiagų apykaitos procesų, taip pat nuo gydytos srities. Paprastai gydymo poveikis daugumai pacientų trunka ilgiau, nei vienerius metus.

### **Ar Radiesse™ yra nuolatinis implantas?**

Ne. Produktas yra biologiškai suyrantis ir organizmo suskaidomas natūraliai.

### **Ar Radiesse™ gali būti naudojamas su kitais produktais?**

Jeigu prieš tai buvo padaryta nuolatinio užpildo injekcija, gydyti Radiesse™ nerekomenduojama. Tokiu atveju informuokite savo gydytoją.

### **Ar Radiesse™ gali būti jaučiamas po oda?**

Po gydymo neilgą laiką tarpą Jūs tikriausiai jausite medžiagą. Tačiau, bėgant laikui, medžiagą organizmo audiniai visiškai įsisavins ir ji nebebus juntama.

### **Kiek kainuoja gydymas?**

Kainos skirasi priklausomai nuo gydymo apimties. Jūsų gydytojas informuos Jus apie kainas be papildomų įsipareigojimų.

#### **Radiesse™ privalumai**

- Greitas poveikis dėl elastingos gelio-matricos
- Ilgalaikis poveikis dėl kolageno gamybos stimuliacijos
- Apimties pakeitimas vieno gydymo metu
- Gerai toleruojamas
- Nereikia alergijos tyrimo
- Išbandytas ir patikrintas daugybę kartų

### **Kaip galiu rasti tinkamą gydytoją?**

Svarbu pasirinkti specialistą, kuris turi tinkamos patirties ir praktikos – įskaitant Radiesse™ naudojimo patirtį.

Mes džiaugsimės, galėdami suteikti Jums reikalingą konsultaciją veido ir kitų kūno dalių apimties atstatymo klausimais.



„Radiesse™. Grožis su  
V - efektu.“

# MERZ AESTHETICS



Jeigu norėtumėte gauti daugiau bendros informacijos apie Radiesse™, susisiekite su mumis:

Praktikuojančiojo gydytojo antspaudas

41248 10/10

H. Abbe Pharma atstovybė, M. Marcinkevičiaus g. 19-1, 08433 Vilnius.  
Tel. 8 5 271 1710, faks. 8 5 271 1711, el. paštas info@abbepharma.lt

